

# Mode d'emploi Pacazur®



VOIR LA VIDEO  
D'UTILISATION


<http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4>

## DANGER


NE JAMAIS FORCER POUR L'INTRODUCTION DE DECHETS  
DECHETS A ELIMINER CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR  
RESPECTER LA LIMITE DE REMPLISSAGE - USAGE UNIQUE, NE PAS REUTILISER

## MONTAGE

1) Poser le couvercle sur la cuve

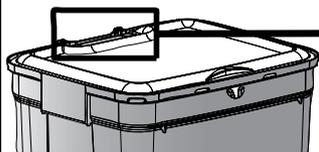

2) Clipser la charnière

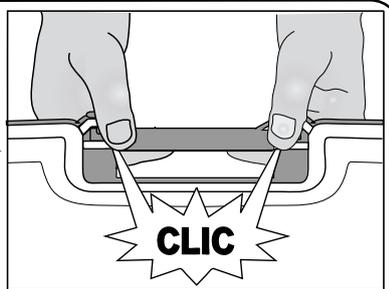

## CHARIOTS



**Montage :** Poser le conteneur dans son emplacement, couvercle à plat monté. Lever le couvercle en position verticale et insérer la tringle dans la poignée.

**Démontage :** retirer la tringle, fermer définitivement le couvercle et extraire le fût.

## FERMETURES PROVISOIRES

### Couvercle plein



#### Fermeture provisoire:

Appuyer sur le couvercle au dessus de la languette et pincer les ailettes pour bloquer le dispositif.

#### Déverrouillage:


Rabattre les ailettes pour dégager la languette.

### Couvercle avec obturateur

**Position 0 :** assemblage - appuyer sur l'obturateur en ∇ et 0 pour l'introduire



**Position 1 :** ouverture assistée par charnière

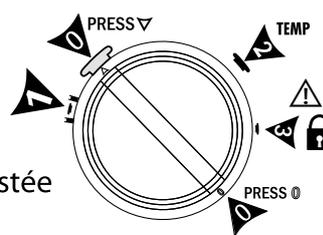

**Position 2 :** fermeture provisoire


**Position 3 :** fermeture définitive

## FERMETURE DEFINITIVE

### ATTENTION :


VEILLER A INTRODUIRE LA BORDURE DU COUVERCLE DANS TOUTE LA PERIPHERIE DE LA CUVE AVANT D'ACTIVER LES CLIPS, NOTAMMENT SI LA SECTION DU BAC A ETE DEFORMEE PAR LE REMPLISSAGE.

- veiller à ce qu'aucun objet ne sorte de la cuve,
- vérifier que les bordures du couvercle et de la cuve sont sèches pour garantir l'étanchéité du joint.

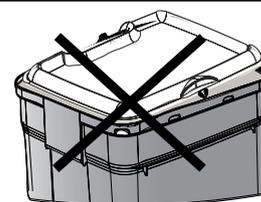

## CLIPSAGE

Pincer la bordure du couvercle et de la cuve au niveau des 11 clips :

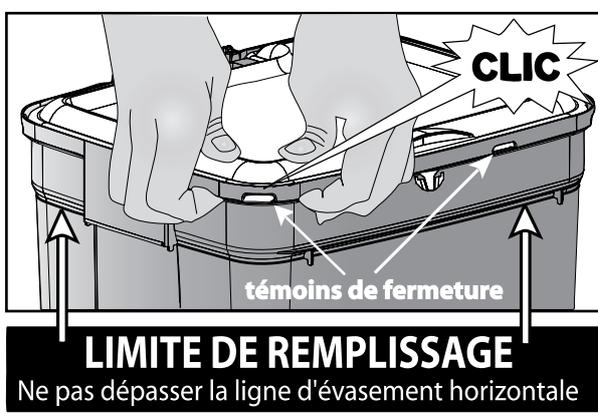

PRESERVEZ-VOUS DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES :



SEUL LE PINCEMENT DE L'EXTREMITÉ DE LA BORDURE AVEC LA CUVE PERMET DE FERMER LE CONTENEUR EFFICACEMENT ET SANS EFFORT.

Après utilisation, actionner le dispositif de fermeture définitive et vérifier le verrouillage conformément aux instructions du fabricant :  
- **comptez les clics entendus lorsque vous fermez,**  
- **l'activation d'un clip se contrôle sur le couvercle et/ou dans les trous de la bordure.**



**Pacazur®**

Conçu et fabriqué en France

# BON USAGE DES FUTS DASRI

Les fûts en polypropylène et leur traitement sont onéreux pour votre structure : ils sont strictement réservés aux déchets infectieux solides qui représentent un risque modéré pour la collectivité.

Ils peuvent accueillir les déchets perforants et les liquides pré-conditionnés.

à Référez-vous aux consignes internes de tri des DASRI

***Le niveau de sécurité réglementaire et normatif peut être sensiblement altéré en cas de mauvaise utilisation, notamment si vous n'activez pas correctement la fermeture définitive.***

## Recommandations préalables à l'utilisation :

- Lire le mode d'emploi ;
- repérer la zone de préhension et le niveau de remplissage ;
- respecter les instructions de montage et les précautions d'emploi ;
- n'utiliser l'emballage qu'une fois prêt à l'emploi : charnière mise en place pour les couvercles standards ou fermeture du couvercle si présence d'un opercule ;
- utiliser les emballages pour stocker uniquement les déchets à éliminer par la filière spécifique des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés.

## Recommandations lors de l'utilisation :

- **respecter la limite de remplissage ;**
- ne jamais forcer pour l'introduction des déchets ;
- veiller à réouvrir la fermeture provisoire avant chaque utilisation ;
- veiller à stocker vos emballages dans un local frais et ventilé.
- Ne jamais placer l'emballage à la portée des enfants et le fermer provisoirement entre deux utilisations ;

Les fûts peuvent être autoclavés pendant 1 heure à 134°C

***Ne pas autoclaver les couvercles***